

ACCESORIOS SPD

EZ-CUT



CORTE AUTOMÁTICO

EZ-CUT permite partir por la mitad la gran mayoría de comprimidos de forma automatizada.



CONFIGURACIÓN SIMPLE

A través de la lectura de los primeros comprimidos introducidos en el dispositivo, calibra sus cuchillas para regular el corte.



RECuento RÁPIDO Y PRECISO

Al finalizar el corte, hace un recuento de los medios comprimidos resultantes.



SEPARACIÓN DE COMPRIMIDOS DEFECTUOSOS

Los comprimidos cortados correctamente se recogen en el recipiente de la derecha, mientras que los defectuosos se recogen en el de la izquierda.



LIMPIEZA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVA GMP

Diseñado para facilitar la manipulación y la limpieza de todos los componentes.



ESPECIFICACIONES

JV-EC10


Características	
Dimensiones (mm)	238 X 406 X 250
Peso (kg)	Aprox. 15
Dimensión máxima del corte (mm)	Comprimido redondo 15 X 7
	Comprimido ovalado 22 X 10 X 8
Monitorización	Panel LCD
Tensión	220-240V 60Hz
Potencia	80W
Velocidad máxima de corte	20 comprimidos/min
Velocidad máxima de recuento	70 comprimidos/min



ACCESORIOS SPD

DESEMBLISTADORA DE MEDICAMENTOS

Permite desemblistar la gran mayoría de formas sólidas orales, ajustándose a la forma y tamaño de cada medicamento.

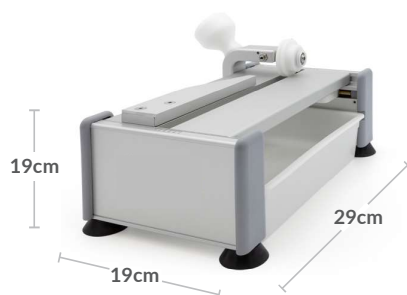

Modelo pequeño

Modelo compacto.
Permite el desemblistado de una o varias filas del blíster.



Modelo grande


Desemblistado rápido.
Permite el desemblistado completo del blíster.



Modelo eléctrico

Desemblistado automático.
Permite regular la velocidad de desemblistado.

MODELO GRANDE: ESPECIFICACIONES

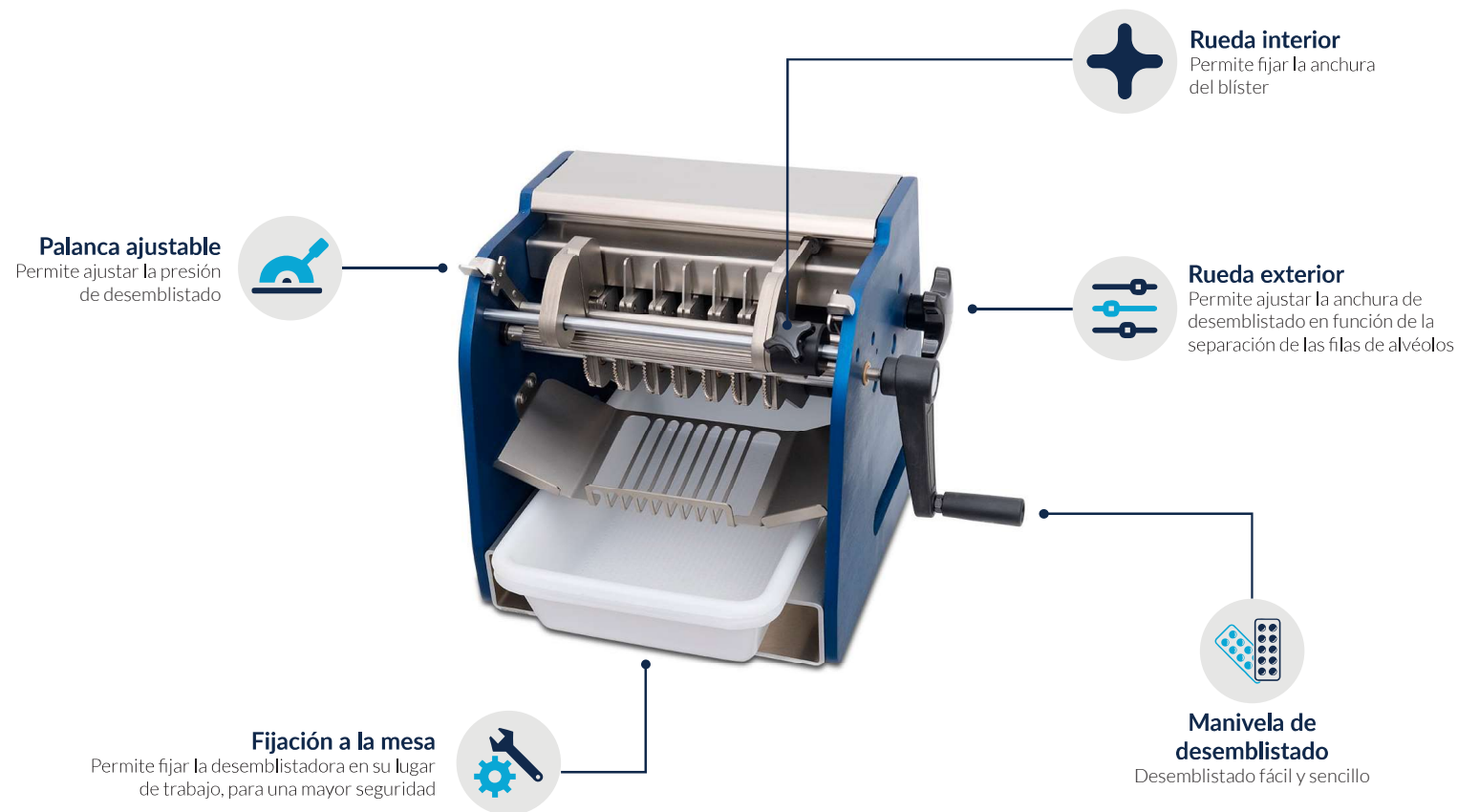

MODELO GRANDE: INSTRUCCIONES DE USO



1
Girar la rueda exterior para ajustar la anchura de desemblistado a la separación de las filas de alvéolos.



2
Girar la rueda interior para fijar la anchura del blíster.



3
Colocar el blíster en la ranura y ajustar la presión de desemblistado con la palanca.



4
Accionar la manivela de desemblistado.

MODELO ELÉCTRICO: ESPECIFICACIONES

